

Щечный ретрактор BEYOND FlexiPro

Представляем BEYOND FlexiPro! Удобный как никогда!

Ретрактор щек BEYOND® FlexiPro™ - амбулаторное стоматологическое устройство, предназначенное для расширения рабочей зоны полости рта при процедурах отбеливания зубов.

Щечный ретрактор BEYOND® FlexiPro™ состоит из пары желобовидных граней, которые можно удобно установить на губы пациента, и моста, соединяющего грани устройства. В середине моста находится ограничитель, который удерживает язык пациента во время процедуры и одновременно действует как поддержка для прикуса, на которую пациент может опереться зубами.

Ретрактор щек BEYOND® FlexiPro™ позволяет расширить вестибулярную поверхность и увеличить рабочую площадь передних 16-20 зубов, а также защитить область губ. Мягкий материал и эластичность обеспечивают безопасные и комфортные условия лечения для пациента. Устройство подходит для холодной стерилизации.

BY-M015, BY-M016

Описание

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

1. Нанесите защитный крем на губы перед постановкой ретрактора.
2. Возьмите в руки и сожмите ретрактор, треугольная отметка должна быть направлена вверх.
3. Вставьте сжатый ретрактор в полость рта пациента с одной стороны.
4. Вставьте другую сторону таким же образом, когда ретрактор надежно зафиксирован. Убедитесь, что губы пациента полностью покрыты ретрактором, как показано на рисунке А.
5. Попросите пациента слегка прикусить внутренний соединительный мост, при необходимости поправьте устройство, чтобы добиться идеальной посадки.
6. Снова сожмите ретрактор и извлеките его изо рта пациента по завершении процедуры.

СОСТАВ: термоэластопласт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: утилизируйте сломанные, дефектные или изношенные изделия.

ОЧИСТКА:

Сразу после использования полностью смойте жидкости и твердые остатки с устройства обильным количеством прохладной проточной воды. Вымойте водой с мылом. Осмотрите и убедитесь, что поверхности чистые и не имеют повреждений, пятен и бионагрузки. По возможности ополосните ретрактор дистиллированной или деминерализованной водой. Осмотрите устройство на предмет видимых повреждений и дефектов.

Стерилизация: используйте холодный раствор для стерилизации. Всегда соблюдайте все инструкции к дезинфицирующему средству.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ:

Не допускайте попадания солнечного света, храните в чистом месте при комнатной температуре и нормальной влажности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Ретрактор щек FlexiPro™

1 инструкция по применению

Клипсы (левая и правая, рис. В)

Прилагаемые клипсы предназначены для использования с Ускорителем отбеливания Beyond II (Ultra).

Дополнительная информация

Масса 226,8 г

Размеры 19 × 12,7 × 6,35 см